

C3® *Einzigartig anatomisch konstruiert.*

Ein externes Inkontinenzhilfsmittel, dem Sie vertrauen können!

C3® bietet Männern eine einfach zu handhabende, komfortable Möglichkeit, um Kontrolle und Vertrauen bei Inkontinenz zu erreichen.



Comfort | Komfort mit C3®

Die filigrane Konstruktion und das elastische Band des C3® minimieren durch Verteilung der radialen Kraft exzessiven Druck auf den Penis. Ausgewähltes Material gewährleistet angenehmes Tragen und weicher Schaumstoff umhüllt geschmeidigen Kunststoff. Verfügbar in zwei Größen offeriert das C3® eine maßgearbeitete Passform für noch größeren Komfort.

Control | Kontrolle mit C3®

Bei angelegter C3® Klemme am Penis, drückt ein weiches Urethra-Polster gegen die Harnröhre. Der unkontrollierte, unfreiwillige Urinverlust wird gestoppt, wobei der normale Blutfluss im Penis für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden so gut wie nicht beeinträchtigt wird.

Confidence | Vertrauen mit C3®

C3® ist so konstruiert, dass es kaum wahrnehmbar ist. Ein elastischer Klettverschluss hält die C3® Penisklemme in Position. Dies erlaubt Ihnen einen normalen Tagesablauf einschließlich Sportaktivitäten, ohne ständig über Kontinenz und Hygiene nachdenken zu müssen.

Das wiederverwendbare C3® ist angemessen preiswert und sollte in einem regelmäßigen Intervall gewechselt werden. Die Kosten liegen unter denen von absorbierenden Hilfsmitteln und Vorlagen.

Einfach und schnell in der Handhabung

Die Klemme wird mit dem Klettverschlussband nach oben gehalten und der Penis wird durch die Öffnung des C3 platziert.

Durch Zusammenklappen der Klemme positioniert sich das Urethra – Polster von unten gegen die Harnröhre. Anschließend wird die Penisklemme mit dem Klettverschlussband gesichert, indem dieses einfach aber nicht zu streng um die Klemme gelegt wird (siehe Bild).



Durch festeres oder loses Fixieren des Klettbandes ist eine Druckregulierung möglich.

Das C3® Hilfsmittel ist in zwei Größen erhältlich. Durch Messen Ihres Penisumfanges mit einem flexiblen Maßband können Sie leicht selbst ermitteln, welche Größe für Sie die Richtige ist.

Beste Messergebnisse erhalten Sie bei normaler Körper- und Zimmertemperatur. Messen Sie Ihren Penisumfang z.B. nicht gleich nach dem Baden oder Duschen.

Mess - Empfehlung

1. Nutzen Sie ein flexibles Maßband.
2. Messen Sie Ihren Penis im normalen und nicht im erigierten Zustand.
3. Legen Sie das Maßband etwa 2 cm vom Körper entfernt um Ihren Penis.
4. Bei nicht zu fest angelegtem Maßband lesen Sie die cm Ihres Penisumfanges ab.
5. Notieren Sie für die Bestellung Ihr Messergebnis:

Regulär: von 6 bis 10 cm Penisumfang

Groß: von 10 bis 14 cm Penisumfang

C3® wird Ihnen selbstverständlich in diskreter Verpackung geliefert!

C₃[®]

Kontinenz Hilfsmittel für Männer



Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns bitte an.
Vertrieb in Europa durch:

mtm | medical | technology | marketing

mtm | medical technology marketing e. K.
Waffenschmiedweg 30a | 86911 Diessen
Germany

Tel.: +49 (0)8807-91138

Fax: +49 (0) 8807-940899

Internet: www.mtm-med.com

Hersteller:

personalmed
advancing pelvic health*

Redmond WA 98052 | USA

US Patent Number 5.184.629

C₃[®]

Kontinenz Hilfsmittel für Männer



Eine gute Möglichkeit, die Ihnen Kontrolle, Komfort und Vertrauen offerieren kann.

Wir helfen Ihnen gerne weiter

mtm | medical | technology | marketing

&

personalmed
advancing pelvic health*

C₃[®]

Kontinenz Hilfsmittel für Männer

Ein externes, nicht invasives Hilfsmittel zur Verbesserung der Lebensqualität bei Inkontinenz

C₃ wurde vom amerikanischen Ministerium für Gesundheit (FDA) geprüft und zugelassen!



Helfen Sie sich bei Inkontinenz mit den 3 C

(Comfort)	wie Komfort
(Control)	wie Kontrolle
(Confidence)	wie Vertrauen