


## Das Anlegen der C3 Penisklemme ist einfach!

1. Nehmen Sie die offene C3 Penisklemme und schieben Sie Ihren Penis durch die Öffnung wie im Bild dargestellt. Das Klettverschlussband ist oben und zeigt nach rechts. Das Druckpolster ist unten und zeigt zum Körper hin.

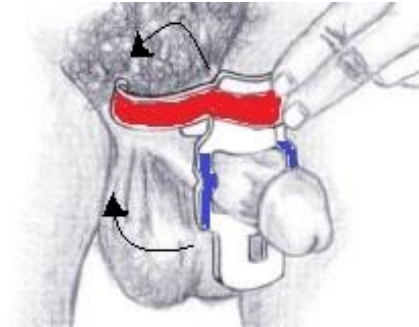


2. Klappen Sie die Ober- und Unterseite der
3. C3 Penisklemme zusammen (siehe Grafik).



4. Legen Sie nun das Klettverschlussband um die Ober- und Unterseite der C3 Penisklemme - wie im Bild dargestellt. Durch strafferes Umlegen des Klettverschlussbandes kann der Druck auf die Harnröhre variabel eingestellt werden.



5. Sollte der Druck immer noch nicht ausreichen, können Sie die selbstklebenden, mitgelieferten, farbigen Plättchen, erst eins und dann weitere nachfolgend am besten übereinander auf das Druckpolster der C3 Klemme setzen.

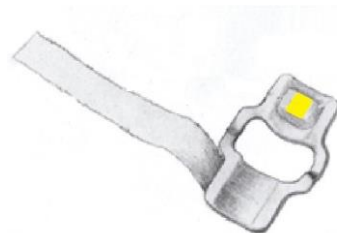

Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich. Bitte rufen Sie uns an:



**mtm** | medical technology marketing e.K.  
86911 diessen | waffenschmiedweg 30 a | germany  
tel:+49 (0)8807-91138  
fax:+49 (0)8807-940899  
e-mail:mw@mtm-med.com  
internet:www.mtm-med.com

und auch da, wo Sie C3 gekauft haben oder bei unseren Internetpartnern:



und

[www.männerinkontinenz.de](http://www.männerinkontinenz.de)